



Orthopädische Systeme GmbH

HEMA Orthopädische Systeme GmbH

An der Brückwiese 2
99610 Sömmerda / OT Tunzenhausen
GERMANY

T. +49 3634 6836-0

F. +49 3634 6836-20

info@hema-online.de

www.hema-online.de

Bearbeitungsrichtlinie

zum orthopädischen Einlagenrohling
- Artikel-Nr. 9604 -
der Firma HEMA Orthopädische Systeme GmbH

für Arbeitssicherheitsschuhe der Marke
DIADORA

Der baumustergeprüfte Einlagenrohling ist für folgende **DIADORA**-Arbeitssicherheitsschuhe zugelassen:

Modell: RUN ESD S3-SRC	(Cod. 701.159799-80013)
Modell: RUN TEXTILE ESD S1P-SRC	(Cod. 701.159800-C0493)
Modell: HI RUN ESD S3-SRC	(Cod. 701.159801-80013)
Modell: RUN II LOW S3 SRC	(Cod. 175303)
Modell: RUN II LOW TEXTILE S1 P SRC	(Cod. 175303)
Modell: RUN II HIGH S3 SRC	(Cod. 175304)
Modell: GLOVE TECH PRO HIGH S3 HRO SRA	(Cod. 173527)
Modell: GLOVE TECH PRO LOW S3 HRO SRA	(Cod. 173528)
Modell: GLOVE TECH PRO LOW S1 P HRO SRA	(Cod. 173657)

Bei der Verwendung und Weiterverarbeitung des orthopädischen Einlagenrohlings mit der Artikel-Nr. **9604** sind nachfolgende Hinweise zwingend zu beachten:

- Der Artikel **9604** wird als orthopädischer Einlagenrohling geliefert und muss fachgerecht in den Schuh eingepasst werden.

Ausschließlich gestattete Änderungen:

- Anpassungen im Zuge von Positionskorrekturen bzw. Korrekturen an die jeweils vorhandene Fußanatomie / Bedürfnisse des Patienten, in Form von notwendig durchzuführenden Schleif- bzw. Schneidevorgängen

Nicht gestattete Änderungen:

- das Anbringen von anderen Bezügen und Materialien
- Veränderungen des Aufbaus
- Ober- und Unterflächenveränderungen wie z.B. Stempel- und Logoanbringung sowie Laserbeschriftungen

Lagerung:

- verschlossen in der Originalverpackung / trocken / kühl (nicht über 40 °C)
- UV-Strahlung vermeiden

Reinigung:

- die Reinigung mit einem feuchten Tuch wird empfohlen

Jegliche Nichtbeachtung führt zum Erlöschen der Gültigkeit der Baumusterprüfung nach DIN EN ISO 20345 und es besteht Haftungsrisiko.