



Orthopädische Systeme GmbH

HEMA Orthopädische Systeme GmbH

An der Brückwiese 2
D-99610 Tunzenhausen

T. +49 3634 6836-0
F. +49 3634 6836-20

info@hema-online.de
www.hema-online.de

Bearbeitungsrichtlinie zum orthopädischen Einlagenrohling

- Artikel-Nr. 9606 -

der Firma HEMA Orthopädische Systeme GmbH

für Arbeitssicherheitsschuhe der Marke

DIADORA

Der baumustergeprüfte Einlagenrohling ist für folgende **DIADORA**-Arbeitssicherheitsschuhe zugelassen:

Modell: D JUMP HIGH PRO LX S3-SRC-ESD CLASS 2	(Cod. 172024)
Modell: D JUMP LOW PRO LX S3-SRC-ESD CLASS 2	(Cod. 172025)
Modell: D JUMP HIGH PRO S3-SRC-ESD CLASS 2	(Cod. 172026)
Modell: D JUMP LOW PRO S3-SRC-ESD CLASS 2	(Cod. 172027)
Modell: D JUMP LOW S3-SRC-ESD CLASS 2	(Cod. 172035)
Modell: D JUMP HIGH S3-SRC-ESD CLASS 2	(Cod. 172034)
Modell: D JUMP LOW TEXT S1P-SRC-ESD CLASS 2	(Cod. 172036)
Modell: D JUMP LOW TEXT PRO S1P-SRC-ESD CLASS 2	(Cod. 172037)

Bei der Verwendung und Weiterverarbeitung des orthopädischen Einlagenrohlings mit der Artikel-Nr. **9606** sind nachfolgende Hinweise zwingend zu beachten:

- Der Artikel **9606** wird als orthopädischer Einlagenrohling geliefert und muss fachgerecht in den Schuh eingepasst werden.

Ausschließlich gestattete Änderungen:

- Anpassungen im Zuge von Positionskorrekturen bzw. Korrekturen an die jeweils vorhandene Fußanatomie / Bedürfnisse des Patienten, in Form von notwendig durchzuführenden Schleif- bzw. Schneidvorgängen

Nicht gestattete Änderungen:

- das Anbringen von anderen Bezügen und Materialien
- Veränderungen des Aufbaus
- Ober- und Unterflächenveränderungen wie z.B. Stempel- und Logoanbringung sowie Laserbeschriftungen

Lagerung:

- verschlossen in der Originalverpackung / trocken / kühl (nicht über 40 °C)
- UV-Strahlung vermeiden

Reinigung:

- die Reinigung mit einem feuchten Tuch wird empfohlen

Jegliche Nichtbeachtung führt zum Erlöschen der Gültigkeit der Baumusterprüfung nach DIN EN ISO 20345:2011 und es besteht Haftungsrisiko.

Stand 12.10.2017